
臺北市政府教育局114年度尿液篩檢送檢驗機構 「於生生物科技股份有限公司」流程

- 一、準備耗材:塑膠杯、空尿瓶、封籤貼紙、監管紀錄表。
- 二、填寫監管紀錄表:
- (一)<u>檢體編號請依學校代碼+日期+流水號</u>,採尿日期、受檢學校(單位)代碼、學制、性別、特定人員類別均應填寫;本局年度採購之<u>指定篩檢項目為安非他</u>命、愷他命及大麻,其餘項目均為加驗項目,請依個案情況勾選需檢驗項目。
- (二)監管紀錄表填寫一式三份(一份隨檢體寄出、一份掃描後寄教育局承辦人電子信箱(hg5969@gov. taipei)、一份自存)。

三、採集尿液檢體:

- (一)每人採檢體分裝為2瓶,每瓶至少30mL,並將檢體應以6度C以下冷藏保存(無 冷藏者改以冷凍)。
- (二)檢體容器需完整並清楚標示編號,檢體容器不可破損、檢體不可外漏,檢體應 蓋緊再並適當封緘。

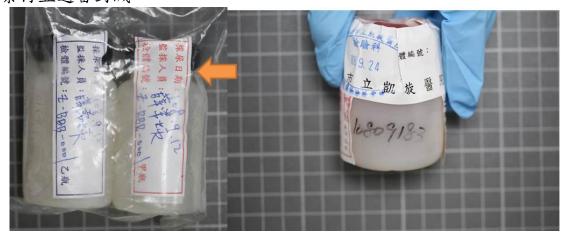

封籤要求:瓶蓋與瓶身處(箭頭)須封到,檢體容器標示編號(可用書寫或標籤紙)。

封籤資訊:檢體編號、採尿日期、採尿人員。

三、包裝及運送:

- (一)檢體應放置於紙箱或保麗龍箱內,空隙可以填塞報紙固定,以膠帶封口後,再裝入紙箱內運送,以避免檢體滲漏。
- (二)檢體送驗採冷藏(無冷藏者改以冷凍)、**貨到付款**方式運送,費用由該中心支付。

(三)寄送資訊:

收件人: 欣生生物科技股份有限公司

聯絡人:林育嘉(分機807)

地址:407021台中市西屯區工業區三十二路86號1樓

TEL: 04-23552098 FAX: 04-23552089

高級中等以下學校『特定人員』尿液檢體監管紀錄表

一.由採尿人貝(或校外會代表)填寫						
採尿日期: 年 月 日 □指定篩檢 □臨機送驗(□快篩陽性,直接送驗:□春暉小組結案/□自我坦承/□遭警查獲/□其他:)						
上相及師做 上面板込織 (上供師) 位任 直接						
學制:□高職□高中□國中□國小						
檢驗項目:□指定篩檢項目						
□單/加驗 傳統項目:□安非他命類 □搖頭丸類 □愷他命類 □ 海洛因及鴉片代謝物 □大麻代謝物						
新興毒品:□卡西酮類 □苯二氮類 □苯乙胺類 □類愷他命類 □依托咪酯類						
序號	必填 檢體編號 特定人員類別	別男	女	試劑廠商	使用藥物/檢體異常/備註(單件加驗)	實驗室編號 (欣生填寫)
1			X .	□台塑 □聯準(華) □其他	/ 開記 (平 1十 ガレ-3数)	(瓜主供荷)
2		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
3		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
4		□ 5		□台塑 □聯準(華) □其他		
5		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
6		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
7		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
8		<u></u>		□台塑 □聯準(華)		
9		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
10		<u></u>		□台塑 □聯準(華) □其他		
採尿人員(或校外會代表)簽名:						
二.由校方人員填寫(確認檢體標籤編號與檢體一致)						
以上尿液檢體共件(每件2瓶)。						
說明:						
校方人員簽名:						
三.由寄件人填寫 寄送時間: 年 月 日 時 分。						
保存方式: □冷藏 □冷凍 □其他。						
寄件人員簽名:						
	由檢驗機關填寫 達時間: 年 月	日 日	序	分。		
_	^{建时间・}		1	7) *		
收件人員簽名: 檢驗機構: 欣生生物科技股份有限公司						